

Produktvejledning



Navn

Box and Block

Ref: **B850**



Beskrivelse

Produktet anvendes til undersøgelse af grov koordination/ øje-hånd koordination.

Skillevæggen placeres i rillen. Alle 150 klodser placeres i den ene side og patienten skal flytte en klods ad gangen over i det tomme rum. Dette skal måles på tid og over en periode kan tiderne sammenlignes til vurdering af forbedring.

Materiale:

PE500 (HMW-PE) / Polystone® D-natural (HMW-PE)



K.C. Pedersen, Baldersbuen 17,1, DK-2640 Hedehusene



Tåler alm. opvaskemaskine ved maks. 60 grader. Ved højere varme vil produktet slå sig og ændre farve.



Kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Advarsel: bør ikke anvendes til børn under 3 år, da der er mindre dele som kan sluges.