



PRODUKTVEJLEDNING:

PRODUKTNAVN: **BOX AND BLOCK**

FORMÅL: At undersøge grov koordination

FUNKTION: Skillevæggen placeres i midten svarende til rillerne, så den står på højkant. Alle 150 klodser placeres i den ene side. Personen som skal undersøges, flytter en klods ad gangen fra den ene side til den anden. Dette gøres under tidstagning

ANVENDELSE: Undersøgelse af øje-hånd koordination.

PRODUKTINFORMATION: Fremstillet af fødevare egnet plast, filt foring til støjdemning

RENGØRING: Tåler almindelig husholdnings opvaskemaskine, opvask i hånd eller afspritning.

ADVARSEL: KLODSE PÅ 2,5 X 2,5 CM - MÅ IKKE ANVENDES SOM LEGETØJ AF MINDRE BØRN.

DE KAN KOMME GALT I HALSEN OG FORÅRSAGE KVÆLNING.

K.C. Pedersen
Baldersbuen 17
2640 Hedehusene
Tlf. 46562968
www.kcpedersen.dk
e-mail: info@kcpedersen.dk