



PRODUKTVEJLEDNING:

PRODUKTNAVN: SENGEMEDEKLODS

FORMÅL: Forhøjelse af seng/stol for at lette ind og udstigning af seng/stol

FUNKTION: En klods placeres under hvert ben – alle klodser skal have samme højde.

ANVENDELSE: Låget skrues af, og en klods placeres under seng/stole mede i hver ende. Rammen på klodsen skal kunne rumme sengemedelen og sengemedelen skal passe til slids. Låget lægges på og skrues fast med den medfølgende umbraconøgle. Se den medfølgende monteringsanvisning.

PRODUKTINFORMATION: Fremstillet fyrretræs limtræ (miljøgodkendt) -


RENGØRING: Tåler almindelige rengøringsartikler – må ikke lægges i blød.

ADVARSEL: Meden skal placeres i slidsen for at undgå at emnet skrider ned af klodsen. Låget skal være skruet fast inden seng/stol anvendes Check at alt er stabilt.

K.C. Pedersen
Baldersbuen 17
2640 Hedehusene
Tlf. 46562968
www.kcpedersen.dk
e-mail: info@kcpedersen.dk

Monterings anvisning til sengemedeklodser

1. Låget skrues helt af på 2 sengeklodser
2. Sengeklodserne placeres så langt ude på siden af sengemeden som overhovedet muligt. Meden skal være i rillerne
3. Låget spændes fast på sengeklodserne med en umbraco nøgle, så sengemeden/klodsen holdes fast til hinanden

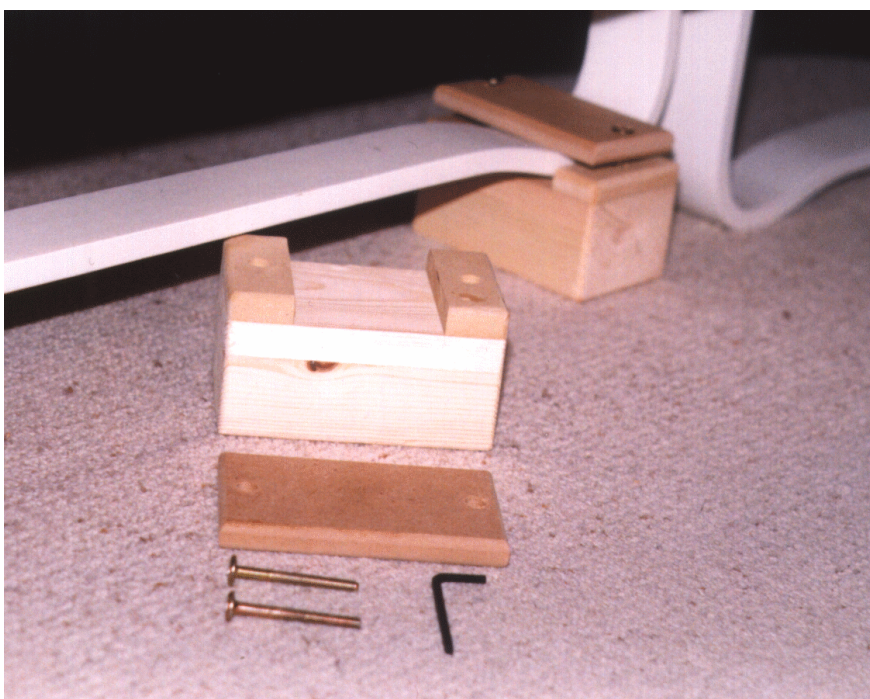

Her er medeklodsen skilt ad. Samtidig ses klodsens korrekte placering – så langt ude på meden som muligt.

Drejer det sig om en dobbeltseng/meget bred seng, bør der placeres en medesengeklods på midten af sengemeden, til stabilisation.